



# Bactrack S30

## Fonctionnement Important

ATTENDRE  
20 MINUTES



NE PAS  
MANGER



NE PAS  
BOIRE



NE PAS  
FUMER



Les utilisateurs doivent attendre 20 minutes après avoir mangé, bu ou fumé avant de souffler dans l'appareil BACTRACK.

À défaut d'attendre 20 minutes, les résultats obtenus peuvent être faussés et on peut endommager le capteur.



### Avant de commencer

Reliez l'adaptateur d'embout à l'embout.



### Étape 1 : Démarrage

Appuyez sur le bouton de mise sous tension du BACTRACK.

Le nombre d'échantillons prélevés depuis la dernière mise au point s'affiche brièvement et le décompte débute.



### Étape 2 : Préparation

Lorsque l'afficheur s'apprête à indiquer 1 unité au décompte, prenez une grande inspiration.



### Étape 3 : Échantillon d'haleine

Au moment où le décompte atteint 0, le BACTRACK émettra des bips et tracera des pointillés à l'intérieur de l'écran ACL. Expirez vigoureusement et continuellement pendant cinq secondes. Pendant l'expiration, le BACTRACK émettra une tonalité continue. Continuez d'expirer jusqu'à l'émission de deux bips.



### Étape 4 : Analyse de l'échantillon

Une fois l'échantillon d'haleine recueilli, le BACTRACK trace des pointillés à l'intérieur de l'écran ACL pendant trois secondes tout en analysant l'échantillon d'haleine.




### Étape 5 : Affichage du taux d'alcoolémie

Une fois l'échantillon d'haleine analysé, le taux d'alcoolémie (TA) évalué s'affiche à l'écran.

Le résultat du test reste à l'écran pendant 10 secondes. Par la suite, le BACTRACK émettra cinq bips avant de s'éteindre.

## ALERTES

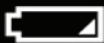

### Piles faibles

L'alimentation des piles est faible. Veuillez les remplacer.



### Erreur de débit

L'échantillon d'haleine est insuffisant. Veuillez reprendre le test en expirant de façon continue pendant cinq secondes.



### Période écoulée

Si l'utilisateur n'expire pas dans les 10 secondes, l'écran ACL affichera « ER » et l'appareil s'éteindra.



### Calibrage

L'appareil doit être recalibré ou subir une mise au point. Veuillez consulter la section Vérification et Calibrage du présent manuel.

# SPEC

<b>Dimensions</b>	1,33 x 4,05 x 0,98 po (3,4 x 10,3 x 2,5 cm)
<b>Poids</b>	1,87 oz (53 g)
<b>Capteur</b>	Semi-conducteur avancé MicroCheck™
<b>Portée de détection</b>	0,00 – 0,40 % alcoolémie
<b>Décompte des tests</b>	Affiche le nombre total de tests effectués
<b>Alimentation électrique</b>	Deux piles AAA, incluses
<b>Autonomie</b>	Environ 200 à 300 tests
<b>Temps de préchauffage</b>	10 à 30 secondes, selon le moment de la dernière utilisation
<b>Temps de réponse</b>	5 secondes
<b>Précision du capteur</b>	+/- 0,01 % alcoolémie @ 0,02 % alcoolémie
<b>Température de fonctionnement</b>	50-104 °F (10-40 °C)

\* On a utilisé les procédures NHTSA/DOT pour tester cet appareil. Lors de ces tests, la précision de cet appareil a pu être établie pour des taux d'alcoolémie (TA) de 0,008 et de 0,032 mais non pour des concentrations plus élevées. On a procédé à d'autres essais en laboratoire pour les concentrations variant entre 0,00 et 0,40 d'alcoolémie

## MISE EN GARDE

1. Assurez-vous d'attendre 20 minutes après avoir bu, mangé ou fumé avant de souffler dans l'appareil. Sinon, la lecture pourrait être inexacte et vous pourriez endommager le capteur.
2. Souffler tout résidu d'alcool, de fumée ou de nourriture avec de la salive dans le BACTRACK peut endommager le capteur.
3. Ne pas utiliser en présence de forts vents, dans un endroit enfumé ou si l'on y consomme de grandes quantités d'alcool.
4. Remplacez les deux piles AAA lorsque l'icône de l'indicateur de piles n'indique qu'un seul trait.
5. Faites calibrer votre appareil de façon régulière, selon le cas. (Voir Calibrage)
6. L'éthylotest BACTRACK est conçu pour fonctionner à des températures variant entre 50-104 oF (10-40 oC). Utiliser l'appareil en dehors de ces paramètres peut influencer l'exactitude des résultats.
7. Évitez d'utiliser l'appareil en présence de méthanol, d'alcool isopropylique ou d'acétone. Ces substances peuvent fausser les lectures.
8. On ne peut pas utiliser les résultats obtenus grâce à ce produit en cour.
9. N'utilisez pas BACTRACK pour déterminer si vous êtes apte à conduire un véhicule ou à faire fonctionner un appareil motorisé ou à exécuter toute autre tâche dangereuse.
10. Si vous conduisez, ne prenez pas d'alcool. Faites appel à un conducteur désigné si vous consommez de l'alcool.